


ThinPrep® Pap Test

Guide pratique de prélèvement

Prélèvement à l'aide de la **brosse Cervex®**.

Prélèvement à l'aide de la **brosse endocervicale (Cytobrush®)** et de la **spatule en plastique**.

Attention : utiliser avec parcimonie le lubrifiant pour spéculum : il pourrait altérer la qualité des résultats

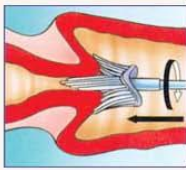

Obtenir


un spécimen adéquat du col de l'utérus : introduire les poils de la partie centrale assez profondément dans le canal endocervical pour permettre aux poils latéraux, plus courts, d'entrer en contact étroit avec la région exocervicale. Pousser doucement et tourner la brosse 5 fois dans le sens des aiguilles d'une montre (2,5 tours complets). En cas de col étroit, envisager un deuxième prélèvement avec la brosse endocervicale (Cytobrush®).



Rincer

la brosse dans le flacon de solution PreservCyt® en la pressant dix fois contre le fond du flacon, en forçant les poils à se séparer. Enfin, agiter vigoureusement la brosse pour libérer le matériel résiduel. Jeter la brosse de prélèvement. **Ne pas laisser la tête de la brosse dans le flacon.**

1 - Spatule en plastique

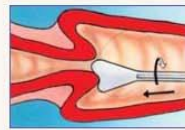

Obtenir


un spécimen adéquat de l'exocol par un mouvement rotatif de la spatule (2 tours).



Rincer

la spatule dans le flacon contenant la solution de conservation (PreservCyt® Solution) en l'agitant vigoureusement 10 fois. **Jeter la spatule.**

2 - Brosse endocervicale (Cytobrush®)

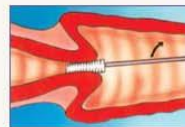

Obtenir

un spécimen adéquat de l'endocol. Introduire la brosse dans l'endocol jusqu'à ce que seuls les poils de la base soient encore visibles. Faire tourner lentement 1/4 à 1/2 tour dans un seul sens. **Ne pas trop tourner.**



Rincer

la brosse dans le même flacon de solution PreservCyt® en la faisant tourner 10 fois, en la pressant contre la paroi du flacon. Agiter vigoureusement la brosse pour libérer le matériel résiduel. Jeter la brosse. **Ne pas laisser la tête de la brosse dans le flacon.**



Visser

le bouchon hermétiquement, jusqu'à ce que la marque noire sur le bouchon dépasse celle présente sur le flacon.



Inscrire

sur le flacon, le nom et le prénom de la patiente et son numéro d'identification sur le formulaire de demande d'analyse cytologique, les informations liées à la patiente et à ses antécédents médicaux



Placer

le flacon et le formulaire de demande d'analyse cytologique dans un emballage destiné à leur transport au laboratoire.

Pour plus de détails sur nos produits, veuillez contacter :

HOLOGIC Benelux B.V.
Transistorstraat 60
1322 CG Almere, Pays-Bas
Tel : +31 (0) 36 711.11.8 6/87
benelux@hologic.com

ThinPrep® and associated logos are registered trademarks of Hologic, Inc. and/or its subsidiaries in the United States and other countries.

benelux@hologic.com

HOLOGIC™
The Women's Health Company

Pour voir les atlas morphologiques ThinPrep® et plus encore ...
visitez les site www.cytologystuff.com et www.thinprep.com